



# ELECTRO-BEAUTY SCULPT

## PRESSOTHERAPY SYSTEM

IDMRTSE5  
[SK]

### ELEKTROSTIMULÁCIA + INFRAČERVENÉ ŽIARENIE + LYMFODRENÁŽ

#### FUNKCIE LYMFODRENÁŽE

Tento prístroj bol starostlivo navrhnutý na použitie v estetike, fyzioterapii, estetickej medicíne, onkológii a angiológii na odvodnenie a zníženie venózných a lymfatických edémov. Produkuje aktiváciu spätného obehu (venózneho a lymfatického), stimulujúcu reabsorpciu intersticiálnych tekutín a odtok týchto tekutín smerom k organickým filtrom.

#### CHUDNUTIE

- Nízkočfrekvencná elektrina môže stimulovať sval k sťahujúcemu alebo kontrakčnému efektu, ktorý odbúrava veľké množstvo tukových buniek.
- Elektrické vankúšiky umiestnené v presných bodoch môžu upraviť funkciu vnútorného organizmu tým, že urýchlia metabolizmus a zabránia tvorbe nových tukových buniek.
- Infračervené lúče prenikajú priamo do bunkovej štruktúry.
- Uvoľnený tuk generuje veľké množstvo tepelnej energie, urýchľuje cirkuláciu krvi a lymfatických uzlín a urýchľuje metabolizmus prostredníctvom biochemickej reakcie, ktorá spotrebuje AIP a spôsobuje katabolizmus tukových buniek, čo tiež podporuje redukciu tuku.
- Airbagy, ktoré sa pri lymfodrenáži pravidelne nafukujú a vypúšťajú s neustálymi zmenami tlaku, aby sa rozložili a zničili tukové bunky.

#### SKRÁŠLENIE

- Keď iónový prúd stimuluje senzorické nervy, ktoré končia v epidermis, ochabnutej pokožke sa vráti jej pružnosť a jemnosť.
- Relaxačný účinok, ktorý prospieva imunitnému systému.
  - Krvný obeh sa urýchľuje a svaly sa zjemňujú vďaka mikroelektrine, ktorá v tele pracuje.
  - Teplo generované infračervenými lúčmi zmiernuje svalové napätie a uvoľňuje sval.
  - Zariadenie stimuluje vstrebávanie použitých výrobkov a posilňuje ich liečivú silu.
  - Znižuje zápal.

#### FUNKCIE ELEKTROSTIMULÁCIE

Svalová elektrostimulácia je spôsob, ako cvičiť svaly pomocou elektrických impulzov. Impulzy sa generujú a aplikujú elektródami na pokožku v blízkosti stimulovaných svalov. Impulzy napodobňujú akčný potenciál pochádzajúci z centrálného nervového systému a spôsobujú svalovú kontrakciu. Elektródy sú pripevnené k pokožke. EMS je forma elektroliečby alebo svalového tréningu. Je to doplnková technika pre športový tréning a v tejto súvislosti existuje veľa publikovaných štúdií.

#### FUNKCIE TERMOTERAPIE

Termoterapia sa chápe ako tepelné ošetrenie chorôb a úrazov. Terapeutické teplo sa môže aplikovať ožarovaním, vedením alebo prúdením pomocou rôznych metód, od infračerveného žiarenia po parafínové aplikácie, a môže sa aplikovať na úrovni povrchu alebo hlboko v tkanive. Termoterapia je cenným terapeutickým nástrojom pri mnohých traumatických a reumatických procesoch, jedným z jej bezprostredných hlavných účinkov je úľava od bolesti.

# ELECTRO-BEAUTY SCULPT PRESSOTHERAPY SYSTEM



## REŽIMY LYMFODRENÁŽE

**REŽIM A**, získa sa ľahká peristaltická masáž, ktorá sa indikuje najmä vo fázach údržby alebo keď intenzívna masáž nie je potrebná.

**REŽIM B**, získa sa intenzívna peristaltická masáž, odporúča sa pre ľudí, ktorí potrebujú veľmi intenzívne ošetrovanie, ako je zjavná prítomnosť celulitídy, tuku alebo celková stagnácia tekutín.

**REŽIM C**, je určený na intenzívnu peristaltickú tlakovú masáž zameranú na brucho a stehná, ktorá sa odporúča klientom so zjavnou celulitídou alebo tukom.

**REŽIM D**, je určený na peristaltickú tlakovú masáž zameranú na brucho a ruky, toto sa odporúča najmä pre brušné svaly.

## REŽIMY ELEKTROSTIMULÁCIE

**REŽIM A**, frekvencia 10 Hz, na ošetrovanie s malou ochablosťou alebo pre ľudí citlivých na elektrostimuláciu

**REŽIM B**, frekvencia 20 Hz, pre stredne priepustné ošetrovanie

**REŽIM C**, frekvencia 30 Hz, na ošetrovanie s vysokou ochabnutosťou

**REŽIM D**, frekvencia 40 Hz, na ošetrovanie veľmi vysokej ochablosti

**FREKVENCIA:** 400 Hz

úroveň 1= 8ma.  
úroveň 2= 10ma.  
úroveň 3= 12ma.  
úroveň 4= 14ma.  
úroveň 5= 17ma.

úroveň 6= 20ma.  
úroveň 7= 25ma.  
úroveň 8= 30ma.  
úroveň 9= 35ma.  
úroveň 10= 38ma.

úroveň 11= 41ma.  
úroveň 12= 44ma.  
úroveň 13= 46ma.  
úroveň 14= 48ma.  
úroveň 15= 50ma.

## PRÍSLUŠENSTVO

- FAREBNÁ DOTYKOVÁ OBRAZOVKA. - 1 pás na brucho a zadok, plne prispôbovívý,
- LAHKÉ PROGRAMOVANIE. - 2 x nohy, nastaviteľné na rôzne veľkosti.
- ELEKTROSTIMULÁCIA
  - 5 veľkých elektród.
  - 5 malých elektród.
  - bandáže na elektródy
- TLAKOVÁ TERAPIA:
  - 10 kanálov.
  - 20 vreciek -
  - 2 ramená.
- 1 ochranná deka a organizér hadíc v praktickom bočnom puzdre
- Naše doplnky sú vybavené vysokoodolným kvalitným suchým zipsom.

## ŠPECIFIKÁCIE

- VÝKON: 350 W.
- NAPÄTIE: 240/110 V.
- FREKVENCIA: 50/60 HZ.